


Onderhoud klikgebit:

Een klikgebit dient dagelijks goed door u te worden onderhouden.

1. De drukknoppen of de steg moet minstens een keer per dag worden gereinigd met een tandenborstel en tandpasta.
Heeft u ook een stegconstructie dan dient de ruimte onder de steg aanvullend met ragers te worden gereinigd.
Dit om ophoping van voedselresten, tandplaque en tandsteen te voorkomen.

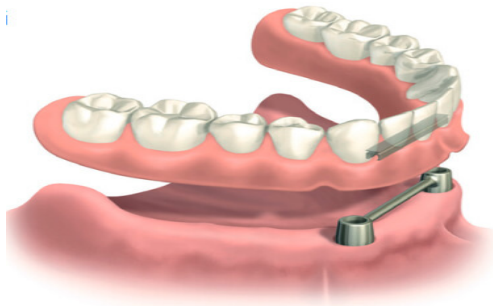

2. 's Nachts wordt het aanbevolen om het klikgebit niet te dragen.
Tijdens uw slaap vermindert de speekselproductie.
Hierdoor hopen er makkelijk bacteriën en schimmels op uw klikgebit.
Dit kan roodheid en zwelling van het tandvlees veroorzaken.
Als u voor een lange periode met uw klikgebit in slaapt, zijn de implantaten meer vatbaar voor ontstekingen en kan het kaakbot onder uw klikgebit gaan slinken.
Dit leidt tot pijn, minder houvast van uw klikgebit en in het ergste geval het verlies van de implantaten.



3. Wij raden aan om 2 maal per dag uw klikgebit van binnen en van buiten te poetsen met water en zeep.
Gebruik gelieve **geen** tandpasta.



LISA TANDTECHNIEK
Tandtechnisch Laboratorium

In tandpasta zitten kleine schuurdeeltjes die het oppervlak van uw klikgebit ruw kunnen maken.

Hierdoor hecht er makkelijker vuil op uw klikgebit en kan deze sneller gaan verkleuren.



4. Daarnaast is het van belang dat u minstens 1 keer per jaar bij ons langs komt voor een periodieke controle voor de implantaten en klikgebit.